

Turquoise

NAZAL CPAP MASKE



fix

KULLANMA KILAVUZU




active

Turquoise Nazal CPAP Maske

Bilgi ve Semboller



Güneş Işığından koruyunuz.

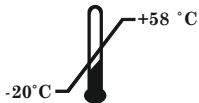

Uyarılar ve Önlemler



Kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.



KNGMED Medikal Ltd. Şti.
Çınar San. Sit. 10001 Sok.
No:28/A-10 Ulukent, Menemen
İzmir TÜRKİYE 35663
Telefon: 0232 833 42 62
Fax: 0232 833 42 63
Web: www.kngmed.com
E-mail: info@kngmed.com



LOT, REF numaraları, üretim ve son kullanma tarihleri kutunun üzerindedir.






Kullanım Amacı:

Turquoise Nazal Maskeler bir uzman tarafından CPAP, Bi-PAP ve Auto PAP terapisi reçete edilmiş hastaların kullanımı için tasarlanmıştır. Turquoise Nazal Maskeler CPAP, Bi-PAP, Auto-PAP terapi cihazlarında evde tek hastada ya da sağlık merkezlerinde birden çok hastanın kullanımına uygundur.



✓CPAP cihazınız açık değilse ve doğru şekilde çalışmıyor ise Turquoise Nazal Maskenizi takmayınız.

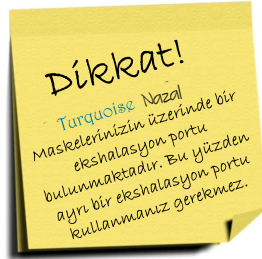

İlk kullanımdan önce ve gerektiğinde maskenizi temizleyiniz.

İlk Kullanımdan Önce:



- ✓Kullanım talimatlarını okuyunuz.
- ✓Turquoise Nazal Maskenizi kullanmadan önce tüm ambalajı açınız.
- ✓Maskenizi elde yıkayınız.
- ✓✓Turquoise Nazal Maskenizin görünen kırık, yırtık, hasarlı, defolu parçası olup olmadığını kontrol ediniz.
- ✓Yüzünüzü/hastanın yüzünü temizleyiniz.
- ✓Maskenizin hava çıkışlarını daima açık ve temiz tutunuz



➤ Uyarılar ve Önlemler:



✓Nazal ya da fullface maskenizi kullanırken cildinizde kızarma, iritasyon ya da rahatsızlık hissettiğinizde maskenizi kullanmayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

✓Beklenmeyen bir etkiyle karşılaştığınızda **Turquoise** Nazal Maskeyi kullanmayı bırakınız ve doktorunuza ya da uyku bozukluğu uzmanınıza danışınız.



Boyutlar:

Small
Medium
Large

✓**Turquoise** Nazal Maskeniz yüzünüze rahatça oturmalıdır. Maskenizin yüzünüze uygun boyutta olduğunu kontrol ediniz.

Dikkat!

Her maskede olduğu gibi düşük CPAP basınçlarında tekrar soluma meydana gelebilir.



✓Cihazla birlikte oksijende kullanılıyorsa cihaz kapatıldığında oksijende kapatılmalıdır. Aksi halde oksijen cihaz içinde birikip yangın riski oluşturur

Dikkat!

Turquoise Nazal Maskeler yaşam desteği ventilasyonu sağlamak için uygun değildir.




✓ Düşük PAP basınçlarında hava ekshalasyon portundan tamamen atılmayabilir ve tekrar soluma meydana gelebilir.



➤ Temizleme Talimatları:

Maskenin Temizlenmesi:

- ✓ İlk kullanımdan önce ve her kullanımda **Turquoise** Nazal Maskenizi temizleyiniz.
- ✓ **Turquoise** Nazal Maskenizin günlük temizliğinde neopren başlığı çıkarmanız gerekmez.
- ✓ Maskenizi elde, ılık suda sabun kullanarak yıkayabilirsiniz.
- ✓ Maskenizin tüm parçaları içme suyu ile iyice durulanmalı ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan kurumaya bırakılmalıdır.

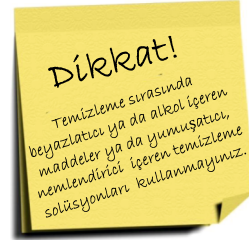

Neopren Başlığın Temizlenmesi:

- ✓ Neopren başlık haftada bir ya da gerekli görülen sıklıkta yıkanabilir. Nazal maskenizin günlük temizliğinde neopren başlığı çıkarmanız gerekmez.



Hastanede birden fazla hastada kullanım:

- Hastadan hastaya geçirmeden önce maskeyi otoklavlama ile ya da dezenfeksiyon sıvıları ile temizleyiniz.

İmha:

- Tıbbi atıkların imhası hakkındaki yerel yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz.



Her kullanımdan önce maskenizin yıpranmış, kırılmış, yırtılmış parçası olup olmadığını kontrol ediniz.

➤ **Yedek Parçalar ve Numaraları:**

Dikkat!

Her kullanımdan önce maskenizin yıpranmış, kırılmış, yırtılmış parçası olup olmadığını kontrol ediniz.

Sp.ADstSi



Silikon Alın Desteği

Sp.ADstPC



*Polikarbon Alın Desteği

Sp.KonwClp-N



Klipsli Hortum Konnektörü

*Maske hortum girişleri TS EN ISO 17510 standardı uyarınca koniktir ve çap ölçüsü 22 mm'dir.

Sp.DrsKon-N



Dirsek Konnektör

SP.O2T-N



Oksijen tıpası Fullface mask için (bir çift)

Item: Sp.SiGv-FA



*Silikon Gövde (S, M, L, XL)

Sp.HdGr



Neopren Başlık

Item: Sp.PCGv-FA



*Polikarbon Gövde

* Bu parça maskenin modeline göre değişiklik gösterebilir.



➤ Adım Adım Kullanım Talimatları:



Adım 1. Maskeyi takmadan hortum konnektörünü yanındaki klipslerine basarak maskeden ayırınız. Ayırdığımız konnektörü hortuma takınız. Bu parça ile maskenizi hortuma kolayca bağlayabilir ve kolayca ayırabilirsiniz.



Adım 4. Çene kısmındaki başlık klipslerini takınız.



Adım 2. Başlığın cırt cırtlı uçlarını alın desteğine resimde görüldüğü biçimde geçiriniz.



Adım 5. Maskenin sıkılığını alın ve çene kısmındaki cırt cırt yardımıyla rahatınıza göre ayarlayınız.



Adım 3. Maskeyi şekildiği gibi tutarak başlığı başınızın üzerinden geçirerek maskeyi yüzünüze yerleştiriniz.




Adım 6. Maske doğru ayarlandığında yüzünüze batmamalı ve cildiniz maskenin çevresinde çıkıntı yapmamalıdır.





➤ **Teknik Detaylar:**

Terapi Basıncı : 4 cmH₂O ila 20 cmH₂O
Depolama ve Taşıma : -20° C ila +58° C (-4° F ila +136° F)

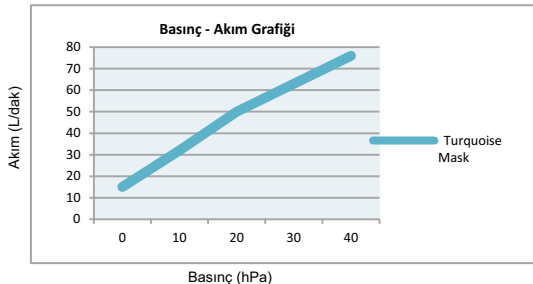

KNGMED Medikal Ltd. Şti.

Çınar San. Sit. 10001 Sok. No: 28/A-10

Ulukent, Menemen – İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 833 42 62

Fax: +90 232 833 42 63

www.kngmed.com

info@kngmed.com

kng.info@yahoo.com



IFU.E 7.8.2/ Rev.01/ 01.04.2017



1014